

Diagnose Blasenschwäche

Blasenschwäche ist ein sehr persönliches Problem. Wir möchten, dass Sie sich selbst helfen können. Zur natürlichen Selbstbehandlung bei Blasenschwäche haben wir einen Tampon entwickelt, der die Lebensqualität erhält bzw. zurückbringt.



Mini (Größe 1) Regular (Größe 2) Extra (Größe 3)

Der Contam® Vaginaltampon steht in 3 Größen zur Verfügung. Für die Auswahl der individuell richtigen Größe vor Beginn der Therapie ist ein Startset bestehend aus 3 Tampons (je 1x Mini, Regular, Extra) erhältlich.

Anwendung und Wirkungsweise

Vaginalbereich ohne Tampon

Richtige Anwendung!

Falsche Anwendung!



Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon (Urinverlust).



Tampon im vaginalbereich übt Druck auf Harnröhre aus. Damit wird unkontrollierter Harnabgang verhindert.



Tampon ist zu tief in die Scheide eingeführt!

Diagnose Senkungsbeschwerden

Mit dem Contam® Vaginaltampon in Würfelform können verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmutter senkung sowie Blasenentleerungsstörungen behandelt werden. Die Flexibilität bzw. Elastizität des angewandten PVA-Schaumstoffs ermöglicht die einfache Selbstbehandlung.



Größe 1 Größe 2 Größe 3

Der Contam® Würfeltampon steht in 3 Größen zur Verfügung. Für die Auswahl der individuell richtigen Größe vor Beginn der Therapie ist ein Startset bestehend aus 3 Tampons (je 1x Größe 1, 2, 3) erhältlich.

Anwendung und Wirkungsweise

Vaginalbereich ohne Tampon

Richtige Anwendung bei Senkungsbeschwerden



Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon.




Würfel ist tief genug in die Scheide eingeführt!

Gebrauchsanleitung

- 1 Vor der Verwendung bitte gründlich Hände waschen.
- 2 Contam® aus der Verpackung nehmen, Folie entfernen und Rückholfaden abwickeln.
- 3 Contam® kurz in warmen Wasser einweichen (ca. 1 Minute).
- 4 Restflüssigkeit ausdrücken. Contam® wird weich und elastisch und kommt so zur Anwendung.
- 5 Contam® ist vaginal einzuführen. Nehmen sie dazu eine bequeme Position ein.
- 6 6A bei Inkontinenz; siehe unten
6B bei Senkungsbeschwerden; siehe unten
- 7 Wechseln Sie den Tampon aus hygienischen Gründen nach 12 Stunden.
- 8 Entsorgung über den Hausmüll.


6A Anwendung bei Inkontinenz (Blasenschwäche)

Führen Sie Contam® mit den Fingerspitzen tief in die Scheide ein, ziehen Sie den Tampon dann etwas zurück, damit er mit den Fingerspitzen wieder tastbar ist.

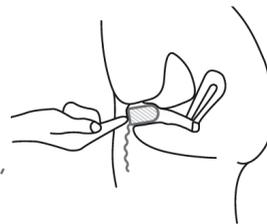

6B Anwendung bei Senkungsbeschwerden

Führen Sie Contam® mit den Fingerspitzen so tief wie möglich in die Scheide ein. Hinweis: Tampon kann nicht in den Körper abgleiten!

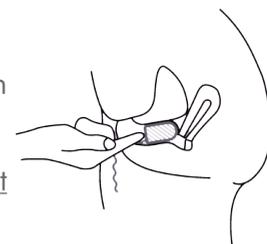

Sicherheit mit Comfort.

Contam[®]

...damit Sie sicher „gehen“!

Contam[®]

Vaginaltampons

Wieder aktiv sein mit Contam[®]



Contam[®]

Vaginaltampons

Contam[®] Vaginaltampon Bei Blasenschwäche (Inkontinenz)

Bezeichnung	Durchmesser / Länge* (feucht)	
Startset	Mini, Regular, Extra	3 Stück
Mini Größe 1	22mm / 61mm	5 Stück
Regular Größe 2	28mm / 61mm	5 Stück
Extra Größe 3	33mm / 66mm	5 Stück

Contam[®] Würfeltampon Bei Senkungsbeschwerden

Bezeichnung	Abmessungen* (feucht)	
Startset	3 Größen / 32, 37, 42mm	3 Stück
Würfel Größe 1	32x32mm	5 Stück
Würfel Größe 2	37x37mm	5 Stück
Würfel Größe 3	42x42mm	5 Stück

*Die Abmessungen sind Zirkawerte im Verwendungszustand (feucht)

Erhältlich bei Bandagisten und in Apotheken.

Hersteller:



Med SSE System

GmbH
Alfred von der Lehr

Herderstrasse 5-6 • D-90427 Nürnberg • Deutschland
Tel. 0911/7 90 88 06 • Fax 0911/79 23 37
Internet: www.medsse.de • E-Mail: info@medsse.de

Vertrieb Österreich:



Dr. A.&L. Schmidgall
Wolfganggasse 45-47 • A-1121 Wien
Tel. 01/81158-0 • Fax 01/81158-7
E-mail: office@schmidgall.at

Bei Blasenschwäche und Senkungsbeschwerden